



Suma Med Enzyme

Detergente líquido suave enzimático para dispositivos médicos

Descrição

Suma Med Enzyme é um detergente suave enzimático especialmente formulado para uma excelente remoção da sujidade de instrumentos médicos, em regiões de águas de dureza baixa a média.

Propriedades

Suma Med Enzyme é um detergente suave enzimático adequado para utilização numa vasta gama de máquinas de lavar e desinfetar e máquinas de lavar louça. O produto é especialmente indicado para limpar a sujidade de instrumentos médicos, material de anestesia e equipamento endoscópico em máquinas de lavar e desinfetar. Contém uma enzima proteolítica para uma excelente remoção da sujidade, em regiões de águas de dureza baixa a média.

Benefícios

- Elimina sujidade e sangue ressequido
- Fórmula altamente concentrada permite excelentes resultados de poupança
- Limpeza com enzimas protege os instrumentos compostos por materiais sensíveis ao pH
- Manuseamento fácil devido à embalagem pequena e conveniente


Instruções de utilização

Suma Med Enzyme é normalmente aplicado através de um sistema doseador automático a uma concentração entre 2 ml e 6 ml/L, a uma temperatura inicial de 20 °C a 25 °C.

Inserir o tubo de sucção na embalagem do detergente e de seguida o doseamento será feito de um modo correto.

O produto também poderá ser doseado manualmente. Neste caso deverá utilizar-se luvas (PVC, nitrilo, látex ou neopreno).

Os níveis de dosagem poderão ser alterados de acordo com as condições de cada cliente.

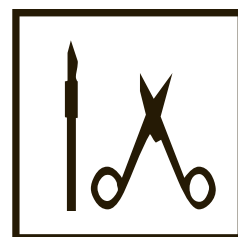

° A.I.S.E.

**Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão variar de acordo com a situação de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos). Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey.*



Suma Med Enzyme

Dados Técnicos

Aspeto: Líquido incolor, transparente

pH (solução a 1% a 20 °C): 8,5

Densidade relativa (20 °C): 1,15

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – sds.diversey.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional/especialistas.

Compatibilidade do produto

Segundo as recomendações de utilização, Suma Med Enzyme é adequado para utilização na maioria dos materiais habitualmente encontrados num hospital.