

FICHA TÉCNICA

Máscara Cirúrgica Tipo IIR	
<p>DESCRIÇÃO</p> <p>Máscaras Cirúrgicas de uso único destinadas a cobrir a boca e o nariz, constituindo uma barreira para minimizar a transmissão direta de agentes infecciosos. Possuem três dobras, fixação nas orelhas através de elástico e clipe nasal de fácil ajuste.</p> <p>Este produto é um Dispositivo Médico não invasivo, de curto prazo, não reutilizável e não estéril, pertencente à Classe I, de acordo com a regra 1 do Anexo VIII do Regulamento (UE) 2017/745.</p> <p>Este produto cumpre os requisitos da norma EN 14683:2019+AC 2019.</p>	 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">REF</div> <div>MC03.2402019</div> <div>CDM 74107119</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div>HS CODE 6307.90.95</div> <div>CNP ---</div> </div>
<p>INSTRUÇÕES E PRECAUÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Higienizar as mãos de acordo com as boas práticas recomendadas, antes e após a utilização e manuseamento da máscara; - Colocar a máscara na face com a parte branca para o interior e a de cor para o exterior e a zona do clipe nasal para cima, abrindo as pregas; - Ajustar o clipe nasal ao nariz, pressionando e ajustando a máscara, cobrindo o nariz, a boca e o queixo, de forma a que não fiquem espaços entre o rosto e a máscara; - Não tocar na máscara durante a utilização; - Substituir assim que se observe humidade; - Remover a máscara tocando apenas nos elásticos, não tocar na zona de tecido; - Descartar em contentor de resíduos; - Não reutilizar, alterar, modificar, limpar ou reparar a máscara; - Não utilizar em caso de alergias aos materiais; - Não utilizar para outro fim que não o previsto. 	<p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</p> <p>Modelo: Máscara Cirúrgica Tipo IIR</p> <p>Tamanho: Único</p> <p>Construção: Solda por ultrassons</p> <p>Dimensões: 17,5 x 9,5 cm</p> <p>Composição: 100% PP (SMS); elástico; liga metálica</p> <p>Cor: Azul</p> <p>Eficiência de Filtração Bacteriana (BFE): ≥ 98%</p> <p>Pressão Diferencial (permeabilidade ao ar): < 60 Pa/cm²</p> <p>Pressão da Resistência ao Salpico: ≥ 16,0 kPa</p> <p>Limpeza Microbiana: ≤ 30 ufc/g</p>
<p>INDICAÇÕES</p> <p>Máscaras concebidas para limitar a transmissão de agentes infecciosos dos profissionais de saúde para os doentes, durante os procedimentos cirúrgicos e outros atos clínicos com requisitos similares. Às de tipo IIR acresce a função de proteger o utilizador de salpicos de líquidos potencialmente contaminantes.</p>	
<p>SIMBOLOGIA APLICADA</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">         </div>	
<p>PRECAUÇÕES DE ARMAZENAMENTO</p> <p>Conservar em lugar seco, fresco e sem pó. Evitar humidade e proteger da luz solar.</p> <p>Armazenar a temperatura superior a +10°C e inferior a +40°C.</p> <p>Validade de 5 anos após a data de fabrico.</p>	<p>FABRICANTE</p> <p>INTERESPUMA – Ind. Poliuretanos, Lda.</p> <p>Rua da Solidariedade – Zona Industrial de Alfêloas</p> <p>3780-315 Anadia – PORTUGAL</p>

FT.19_01_09.02.2022