

# Oxivir Excel Wipe CE

## Toalhetes para limpeza e desinfeção de dispositivos médicos não invasivos

### Descrição

Diversey Oxivir Excel Wipe combina limpeza e desinfeção num único passo, a tecnologia patenteada AHP da Diversey oferece a melhor alternativa aos desinfetantes tradicionais, fornecendo uma eficácia virucida total em apenas 30 segundos, apesar de ser muito suave para as superfícies com o mínimo de risco para os colaboradores e clientes. O ingrediente ativo, peróxido de hidrogénio, transforma-se em água e oxigénio em poucos minutos após a sua utilização, não deixando resíduos que possam ser prejudiciais ou alterar a aparência das superfícies.

### Propriedades


- Eficácia virucida em apenas 30 segundos
- Elimina rapidamente um vasto espectro de vírus, bactérias e leveduras
- Poder superior de limpeza graças ao elevado desempenho do sistema de tensoativos
- Sem perfume
- Não necessita de enxaguamento
- Seguro para o ambiente assim como para os utilizadores, uma vez que os ingredientes ativos dão origem a água e oxigénio. Isento de APE, NPE e COV.

### Benefícios

- Ampla eficácia, proporcionando elevados níveis de proteção dos pacientes. Extensivamente testado de acordo com diversas Normas Europeias e eficaz contra diferentes tipos de agentes patogénicos. Tem eficácia virucida, incluindo Polio, Adeno, e Murine norovirus, sendo considerado eficaz em todo o tipo de vírus encapsulados, tais como: HIV, HBV, HCV, Influenza, Vaccinia virus e Coronavírus
- Seguro para os utilizadores, sem necessidade de EPI. Sem classificação de perigo
- Excelente poder de limpeza é 10 vezes mais rápido que um desinfetante habitual
- Fórmula à base de AHP, não danifica as superfícies, aumentando o tempo de vida dos equipamentos. Não deixa resíduos
- Adequado para usar em zonas de alto risco, como a área hospitalar, retalho, educação, entre outros sectores
- Melhora a capacidade de desinfeção até 35%. Não utilizar em dispositivos médicos invasivos

### Instruções de utilização

1. Remover a sujidade difícil
2. Abrir a embalagem, retirar um toalhete e fechar a tampa
3. Limpar a superfície, garantindo que toda a superfície é humedecida e deixar secar ao ar
4. Assegurar que a superfície se mantém humedecida durante o tempo de contacto
5. Substituir o toalhete, sempre que este não deixar a superfície humedecida após a sua passagem; quando estiver visivelmente sujo ou sempre que mudar para outra área a limpar

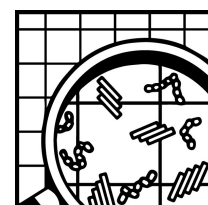



# Oxivir Excel Wipe CE

## Dados Técnicos

Aspeto:	Toalhete de polipropileno
Odor:	Neutro
pH (em uso):	1.95
Densidade relativa (g/cm <sup>3</sup> ; 20°C):	≈ 1.00
Validade:	720 dias

*Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.*

## Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – <https://sds.diversey.com>. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional / especialistas.

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)

© 2022 Diversey, Inc. Todos os direitos reservados. 16/08/2022 pt-PT (K00248)