

MoliCare® Premium Elastic, fraldas para incontinência

Descrição geral do produto/Finalidade prevista

MoliCare® Premium Elastic são fraldas absorventes com abas laterais elásticas e fitas adesivas reposicionáveis para os cuidados de incontinência. O produto é adequado em casos de fragilidade da bexiga e incontinência urinária e fecal com várias gravidades. Destina-se a pacientes/residentes acamados ou independentes. Os produtos são de uso único e devem ser mudados regularmente, conforme necessário. MoliCare® Premium Elastic pode ser utilizado em ambientes de atendimento domiciliário e instalações profissionais de saúde. A aplicação pode ser realizada por uma pessoa leiga e/ou por um profissional de saúde. Os produtos MoliCare® Premium Elastic correspondem a dispositivos médicos da classe I.

Aplicação/Indicação

Para vários níveis de gravidade de incontinência urinária e fecal.



Referências*

Embalagem		S	M	L	XL
	Cintura- /anca (cm)	70–90	85–120	115–145	140–175
P30	5 Gotas	165 171	165 172	165 173	/
	6 Gotas	165 271	165 272	165 273	/
	7 Gotas	165 371	165 372	165 373	/
	8 Gotas	/	/	/	/
	9 Gotas	/	/	/	/
	10 Gotas	/	/	/	/
P26	5 Gotas	/	/	/	/
	6 Gotas	/	/	/	/
	7 Gotas	/	/	/	/
	8 Gotas	165 471	165 472	/	/
	9 Gotas	165 571	165 572	/	/
	10 Gotas	/	/	/	/
P24	5 Gotas	/	/	/	/
	6 Gotas	/	/	/	/
	7 Gotas	/	/	/	/

MoliCare® Premium Elastic, fraldas para incontinência

	8 Gotas	/	/	165 473	/
	9 Gotas	/	/	165 573	/
	10 Gotas	/	/	/	/
P22	5 Gotas	/	/	/	/
	6 Gotas	/	/	/	/
	7 Gotas	/	/	/	/
	8 Gotas	/	/	/	/
	9 Gotas	/	/	/	/
	10 Gotas	165 671	/	/	/
P14	5 Gotas	/	/	/	/
	6 Gotas	/	/	/	165 274
	7 Gotas	/	/	/	165 374
	8 Gotas	/	/	/	165 474
	9 Gotas	/	/	/	165 574
	10 Gotas	/	165 672	165 673	165 674
P1	5 Gotas	165 050	165 051	165 052	/
	6 Gotas	165 054	165 055	165 056	165 057
	7 Gotas	165 058	165 090	165 590	165 060
	8 Gotas	165 061	165 062	165 063	165 064
	9 Gotas	165 065	165 066	165 067	165 068
	10 Gotas	165 069	165 070	165 071	165 072

* algumas referências podem não estar disponíveis em todos os países.

Dispositivo de uso único

A reutilização de um dispositivo médico de uso único é perigosa. O reprocessamento de dispositivos, com a finalidade de os reutilizar, pode danificar seriamente a integridade e desempenho do produto. Informações disponíveis mediante solicitação. A reutilização do produto pode causar contaminação microbológica e/ou infeções leves da pele.

Eliminação do produto

Para a eliminação dos componentes descartáveis de MoliCare® Premium Elastic devem seguir-se os procedimentos de gestão de resíduos de acordo com as leis, regras, regulamentos e padrões de prevenção de infeções locais, a fim de minimizar o risco de possíveis infeções ou poluição ambiental.

Relatórios de incidentes

Para um paciente/utilizador/terceiro na União Europeia e em países com regime regulatório idêntico (Regulamento 2017/745/UE sobre dispositivos médicos); se, durante o uso deste dispositivo, ou como resultado do seu uso, ocorrer um incidente grave, informe o fabricante e/ou o seu representante autorizado e a sua autoridade nacional.

MoliCare® Premium Elastic, fraldas para incontinência

Características de desempenho do produto

Peso total*	S	M	L	XL
5 Gotas	72	83	99	-
6 Gotas	76	92	105	126
7 Gotas	84	101	111	143
8 Gotas	91	123	131	157
9 Gotas	98	126	147	174
10 Gotas	111	167	192	191

*± 10% tolerância

Características do material

Componentes	Material
Parte posterior:	Polietileno laminado com película em tecido não tecido, branco
Núcleo absorvente:	1. camada: polpa de celulose* 2. camada: polpa de celulose* - com polímero superabsorvente 3. camada: polpa de celulose*, "Curled Fiber" *branqueamento sem cloro elementar
Adesivo:	adesivos de "hotmelt" (colagem a quente)
Camada superior:	polipropileno, tecido não tecido, hidrofílico, branco
Barreira:	polipropileno, tecido não tecido, hidrofóbico, branco
Elásticos:	elásticos ajustados às pernas e barreiras firmes
Abas laterais elásticas com fitas	
Tecido não tecido:	polipropileno, tecido não tecido, hidrofóbico, branco
Material elástico:	polipropileno, tecido não tecido, hidrofóbico (Elastic), branco
Fita adesiva:	polipropileno, tecido não tecido, fita em velcro
Indicador de humidade:	tinta solúvel em água

Características do produto

Características	Unidade	S	M	M	L	L	XL
		5 - 10 Gotas	5 - 9 Gotas	10 Gotas	5 - 9 Gotas	10 Gotas	6 - 10 Gotas
Comprimento total*:	[mm]	720	810	810	925	925	980
Largura total do lado abdominal*:	[mm]	290	330	450	490	490	506
Largura total da parte posterior*:	[mm]	610	780	960	960	960	1080
Largura total entrepernas*:	[mm]	280	320	290	290	290	320
Comprimento do núcleo absorvente*:	[mm]	630	660	650	780	780	780
Largura do núcleo absorvente do lado abdominal*:	[mm]	200	200	300	200	360	240
Largura do núcleo absorvente parte posterior*:	[mm]	220	245	380	265	425	350
Largura do núcleo absorvente entrepernas*:	[mm]	170	170	165	170	160	180

*± 10%

MoliCare® Premium Elastic, fraldas para incontinência

Rotulagem


Código de lote com 9 dígitos

p. ex.: 900102822



9	001	02	82	2
ano 201X	chave interna	chave interna	chave interna	dígito de verificação acumulado

Data de fabrico

ex.:  2023 ano 08 mês 07 dia

Data-limite de utilização

ex.:  2028 ano 08 mês 01 dia

Validade: 5 anos

Dispositivo Médico



Manter seco



Não reutilizar



Marcação CE



Identificador único do dispositivo



Última data de revisão: 2023-06-27